

BÍLKOVINA (CELKOVÁ)

KÓD 11800 1 x 50 mL	KÓD 11500 2 x 250 mL	KÓD 11572 1 x 250 mL	KÓD 11553 1 x 1 L		BÍLKOVINA (CELKOVÁ) Spektrofotometrie BIURET
Skladovat při 2 – 30 °C					
Reagencie pro stanovení koncentrace bílkovin. Pouze pro in vitro diagnostiku v klinických laboratořích.					

Hipoproteinemie se objevuje u snížené koncentrace buněk v krvi kvůli nárůstu tekutin – (syndrom zadržování solí a velká intravenózní infuze), nebo u poškození syntéze (vážná podvýživa, chronické onemocnění jater, střevní malabsorpce), nebo při nadmerné proteinové ztrátě způsobené chronickým onemocněním ledvin nebo vážnými popáleninami^{2,4}.

Klinická diagnóza by však neměla být uzavřena jen na základě tohoto výsledku, ale měly by být propojeny klinické a laboratorní výsledky.

POZNÁMKY

1. Tato reagencie může být použita v různých analyzátorech. Aplikační protokoly jsou k dispozici na vyžádání u distributora.
2. Kalibrace provedená vodným standardem může způsobit vychýlení (bias), speciálně na některých analyzátorech. V těchto případech se doporučuje udělat kalibraci za použití séra vycházejícího ze standardu. (Kalibrační serum, kód. 18011 a 18044).

LITERATURA

1. Gornall AG, Bardawill CS, David MM. Determination of serum proteins by means of the Biuret reaction. J Biol Chem 1949; 177: 751-766.2.
2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.
3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
4. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 8.8.2016.

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese:
www.biosystems.es.

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5,

tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Dlhá 43, 900 31, Stupava,

tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

SK : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166