

**Název výroku: HydroCheck E****Zařazení:** test účinnosti sušení flexibilních endoskopů**Typ testu:** detekce reziduí vody ve flexibilních endoskopech**Bližší specifikace:** stěrové tampony na bowdenech různých průměrů a testovací lahvička s detekční tekutinou, detekční limit 0,05 µl vody**Typ mytí:** ruční nebo strojové (MDZ)

82881	HydroCheck E 1,7	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82882	HydroCheck E 2,8	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82883	HydroCheck E 3,8	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82885	HydroCheck E 5,0	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks

**Použití:**

1. Zbytková voda v endoskopech představuje hygienické riziko, vlhkost umožňuje mikroorganismům přežít a množit se. Endoskopy tedy musí být dokonale suché
2. Ujistěte se, že je stěrový tampon suchý a protlačte jej kanálkem endoskopu na doraz – pouze jednou
3. Po vytažení odstříhnete koncový tampon s nosným bowdenem asi v délce 2 cm
4. Tampon vložte do testovací lahvičky, uzavřete a alespoň 3x protřepejte.
5. Odběrové tampony jsou určeny pro jednorázové použití, lze sterilizovat v parních sterilizátorech

**Vyhodnocení:** fialová skvrna na tamponu detekuje zbytkovou vodu v testovaném kanálku nástroje. Velké množství zbytkové vody zbarví tampon celý do fialova.**Důležitá upozornění:** uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění výrobku před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony udržujte suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku vyschnutím nasbírané vlhkosti!**Skladování:** v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 15°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před znečištěním a teplem**Expirace:** 12 měsíců**Uvolňování toxických látek:** žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.**Obsah balení:** viz tabulka**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK
 PEREG GmbH  
 Porschestraße 12  
 D-84478 Waldkraiburg  
 +49 8638 84100