

Kód výrobku: **3FRIN555141, 829211S**
3FRIN555143, 82915, 3FRIN555145

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
 ČR: www.jktrading.cz
 SR: www.jk-trading.sk

Název výrobku: Pyromol E test**Zařazení:** test účinnosti mytí**Typ testu:** detekce reziduí bílkovin v dutinách chirurgických nástrojů

Bližší specifikace: lahvička s reagentií a stěrový tampon na bowdenu, detekční limit 0,1 µg pro detekci nerozpustného proteinového rezidua, které vzniká denaturací bílkovin vlivem glutaraldehydu, kyseliny peroctové a chlorových preparátů.

Typ mytí: ruční nebo strojové (MDZ)**Použití:**

1. Vyjměte testovací ampulku z chladničky, pokud ji tam skladujete, a ponechtejete temperovat na pokojovou teplotu
2. Vlhké části nástrojů setřete suchým tamponem, pokud jsou suché, navlhčete stěrový tampon kapkou sterilní vody
3. Protáhněte tampon na bowdenu dutinou (například u endoskopů, bioptické kanálky)
4. Tampon ustříhnete, vložte do ampulky s reagentií, uzavřete a protřepejte.
5. Po deseti minutách odečtěte výsledek a zaznamenejte jej do dokumentace

Vyhodnocení: pokud zůstane barva tekutiny žlutá a ani tampon nezmění barvu, je výsledek negativní a nebyla detekována žádná rezidua bílkovin. Mycí cyklus proběhl v pořádku.

Jakékoliv zabarvení do modra detekuje zbytky bílkovin v množství alespoň 0,1 µg

Důležitá upozornění: uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění tamponu před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony před používáním udržujte suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku. Kontakt s alkalickými látkami může poskytnout falešně pozitivní výsledek. Doporučuje se provést pozitivní i negativní kontrolu šarže, abyste ověřili správnost testovací sady.

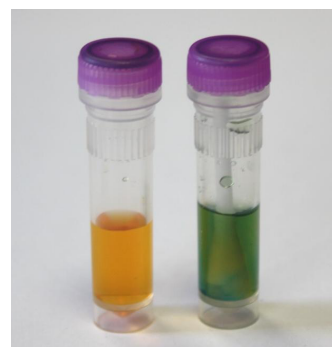
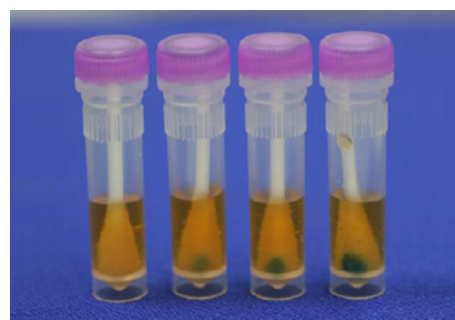
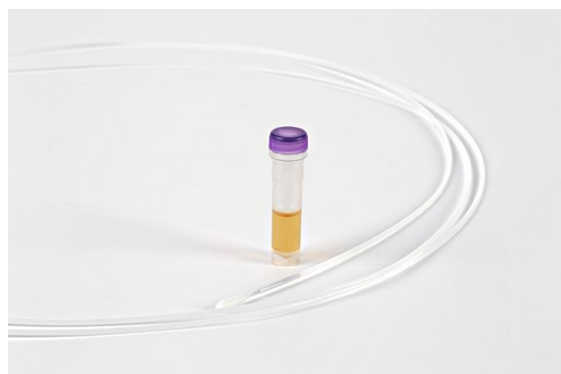
Skladování: v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před přímým světlem, znečištěním a teplem

Expirace: 18 měsíců

Uvolňování toxických látek: žádné, které by mohly ohrozit zdraví nebo vlastnosti výrobku.

Obsah balení:

3FRIN555141	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 1,0 mm, délka 200 cm
829211S	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 1,7 mm, délka 230 cm
3FRIN555143	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 2,8 mm, délka 230 cm
82915	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 3,8 mm, délka 230 cm
3FRIN555145	6 x Pyromol, 6 x bowden průměr 5,0 mm, délka 230 cm

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK

PEREG GmbH
 Porschestraße 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100