

Kód výrobku: Control Tubes

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.czSR: www.jk-trading.sk**Název výrobku: STERIM CONTROL TUBES****Zařazení:** typ 5 integrátor**Typ testu:** chemicko-fyzikální test**Bližší specifikace:** trubičky s tekutinou pro monitorování parametrů sterilizace**Typ sterilizace:** proudící horký vzduch**Expozice:** 160°C/60 min**Použití:**

1. Umístěte kontrolní trubičky STERIM do sterilizátoru společně se sterilizovaným materiálem.
2. Nejvhodnější místo pro umístění trubiček je to, kam teplota hůře vstupuje.
3. Po skončení cyklu vyjměte trubičky ze sterilizátoru. POZOR! Mohou být ještě horké, používejte ochranné pomůcky, může dojít k popálení.
4. Po jeho vychladnutí vyhodnoťte změnu barvy co nejdříve a výsledek zaznamenejte do dokumentace.

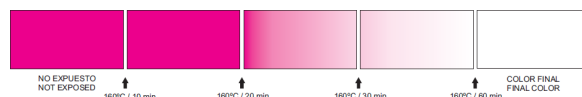
Vyhodnocení:**Vyhovující cyklus:** barva indikátoru se změní z purpurové na bílou/průhlednou.**Nevyhovující cyklus:** pokud zůstane po ukončeném cyklu a po vychladnutí barva narůžovělá, opakujte cyklus s novou várkou testů a přesvědčte se, že jsou během cyklu dodrženy všechny parametry. Nažloutlé zbarvení není na závadu.**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti

10 - 70 % a při pokojové teplotě 10°C - 38°C. Nevystavujte mrazu!

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Expirace: viz obal**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1**Upozornění:** nikdy nevystavujte teplotám nad 190 °C! Používejte ochranné pomůcky pro práci s horkými předměty a pro práci se skleněnými předměty.

V případě prasknutí skleněné ampulky a vylití tekutiny není důvod k obavám, tekutina není toxická.

Obsah balení: 100 kusů trubiček s purpurovou tekutinou**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JKPřed
expozicíSprávné
koncové
zbarvení

Informer Med Sp. Z o.o.
Ul. Winogrody 118
61-626 Poznań
Poland
+48 61 6643850