

## HIS-250

Indikátor horkovzdušné sterilizace

Multiparametrový chemický indikátor

### popis výrobku

Víceparametrové chemické indikátory pro sterilizaci suchým teplem jsou navrženy ve formě papírového proužku s perforací uprostřed, na který byl po celé délce proužku nanesen zelený indikátorový inkoust. Chemický indikátor typu 4 reaguje na dvě nebo více kritických proměnných procesu sterilizace suchým teplem. Reakční doba indikátoru je řízena přesně zvoleným, netoxickým chemickým složením, které neobsahuje olovo a těžké kovy.

Po úspěšně provedeném procesu změni indikátor barvu ze zelené na hnědou.

### technické údaje

- 1,60cm x 10,20cm (250 indikátorů v balení) nebo
- 1,60cm x 5,10 cm (500 indikátorů v balení)

Indikátory nemusíte dělit, velikost indikátoru můžete upravit podle sady, kterou je třeba sterilizovat.

Informace o typu indikátoru podle normy ISO jsou umístěny na každém indikátoru, a to i na dílčích indikátorech. Stejně informace jsou vytištěny také na krabici.

### aplikace a vyhodnocení

Indikační proužek pro suché teplo HIS-250 by se měl používat nejen při každém cyklu, ale také při každé sadě a balení, které se má sterilizovat. Indikační proužek by měl být umístěn uvnitř této soupravy nebo balení. Vsázka by měla být zpracována podle doporučení výrobce sterilizátoru suchým teplem.

Po úspěšně provedeném sterilizačním procesu by měl být výsledek ověřen - správný výsledek je, když se barva indikátoru změni ze zelené na hnědou.

### návod k použití

Pro horkovzdušné sterilizátory všech značek a velikostí.

Suché teplo: teplota 160°C nebo 180°C po dobu 40 min nebo 60 min.



250 kusů testů, každý o dvou částech.



Dva způsoby použití:

- nedělený,
- rozdělený na dvě stejné části.

Informace o typu indikátoru podle normy ISO je umístěna na každém indikátoru i na malém indikátoru.

Normy	Skladování a expirace	Katalogové číslo, balení
ISO 11140-1:2014, typ 4	Uchovávejte v originálním obalu Při teplotě mezi 15-30°C. Po použití chraňte výsledné zbarvení Před přímým slunečním světlem. Datum výroby a expirace je umístěno na každém balení.	<b>HIS-250:</b> <b>Ref. HIS-250</b> 250x2 ks/box (500 jednotlivých kusů)