

Kód výrobku: DH/50

Distributor:



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)**Název výrobku:** DriAMP™ - kultivační souprava**Zařazení:** biologický indikátor - kultivační sada**Typ testu:** biologický**Bližší specifikace:** skleněné ampulky se spórami *Bacillus atrophaeus* a zkumavky s kultivačním médiem**Typ sterilizace:** suché teplo/proudící horký vzduch**Expozice:** ne národních standardů**Inkubace:** 72 hodin při teplotách 36°C – 38°C**Popis výrobku:** sada pro kultivaci biologického indikátoru – ampule s biologickým osídlením *Bacillus atrophaeus* kmene 9372 a osídlením 10<sup>6</sup> a ampule s kultivačním médiem s pH indikátorem pro indikaci změnou barvy**Procesní charakteristika:** indikátory se vloží do sterilizátoru v množství, které předepisuje národní legislativa, zejména na místa, která určil výrobce za neproblematictější. Po vychladnutí se smísí obsah ampulky s kultivační půdou ve zkumavce.

Inkubuje se v inkubátoru za uvedených podmínek.

Pokud zůstane médium čisté, čiré červenooranžové barvy, výsledek je uspokojivý, sterilizace byla účinná.

Neexponovaný indikátor se musí projevit zakalením, zežloutnutím.

**Fyzikální charakteristika:** obsah 1 ml**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 %, chladíte na teplotu 10°C - 27°C

Při skladování chraňte indikátory před přímým slunečním světlem a před vysušením.

**Expirace:** 12 měsíců od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11138-1, 11138-3

každé balení obsahuje certifikát k dané šarži

**Obsah balení:** 50 ampulek s BI + 50 zkumavek s kultivační půdou**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Mesa France  
2 Rue Auguste Fresnel  
69680 Chassieu Cedex – France  
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
Email: [mesafrance@mesalabs.com](mailto:mesafrance@mesalabs.com)