

Kód výrobku: 82881, 82882, 82883, 82885

Distributor:


 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
 ČR: www.jktrading.cz
 SR: www.jk-trading.sk
Název výrobku: HydroCheck E**Zařazení:** test účinnosti sušení flexibilních endoskopů**Typ testu:** detekce reziduí vody ve flexibilních endoskopech**Bližší specifikace:** stěrové tampony na bowdenech různých průměrů a testovací lahvička s detekční tekutinou, detekční limit 0,05 µl vody**Expozice:** mycí automaty, ruční mytí**Popis výrobku:** stěrové tampony na pružném plastovém tamponu, kterým se protáhne kanálek flexibilního endoskopu a následně vyhodnotí vložení do testovací tekutiny v ampulce**Procesní charakteristika:** zbytková voda v endoskopech představuje hygienické riziko, vlhkost umožňuje mikroorganismům přežít a množit se. Endoskopy tedy musí být dokonale suché a pro kontrolu, zda jsou kanálky dokonale suché, je možno použít HydroCheck, ve kterém se případná zbytková vlhkost projeví zbarvením do fialova**Fyzikální charakteristika:** pružný plastový bowden o různých průměrech a testovací tekutina

82881	HydroCheck E 1,7	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82882	HydroCheck E 2,8	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82883	HydroCheck E 3,8	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks
82885	HydroCheck E 5,0	Pružný plast, délka 230 cm, HydroCheck E	6+6 ks

Skladování: v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 15°C - 25°C. Chraňte před vlivem chemikálií, před nadměrnou vlhkostí, před znečištěním a teplem**Poznámka:** uchovávejte v původním obalu, zabraňte znečištění výrobku před použitím, výsledky by mohly být zkreslené. Stěrové tampony udržujte suché! Kontakt s pokožkou může výsledky do značné míry zkreslit! Test proveďte ihned po provedení stěru, aby nemohlo dojít ke zkreslení výsledku vyschnutím nasbírané vlhkosti!**Expirace:** 12 měsíců od data výroby, viz obal**Klasifikace:** ČSN EN ISO 15883**Obsah balení:** viz tabulka**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK
 PEREG GmbH
 Porschestrasse 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100