

# IT27W-10

## Indikátor termodezinfekce a čištění

Pro rutinní kontrolu procesů termické dezinfekce.



### Použití

Určeno pro monitorování procesů dezinfekce vlhkým teplem v pračkách a dezinfekčních zařízeních. Podmínky emulace: 10 min., 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) nebo ekvivalentní..

### Příslušná nařízení

Navrženo podle norem systému řízení kvality ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

### Charakteristika

- Jednostranně laminovaný proužek potištěný indikátorovým inkoustem, syntetický teplotně stabilní nosič.
- Výchozí barva: zelená.
- Konečná barva: fialová.
- Velikost: 69,5 mm x 30 mm.
- ve 100 % neobsahuje žádné toxické těžké kovy



### Výrobní podmínky

Teplota= 15-30 °C, Vlhkost vzduchu 30-80 %.

### Podmínky skladování

Skladujte v chladničce při teplotě 0 °C až 4 °C, relativní vlhkost vzduchu = 30-80 °C.

%, uchovávejte mimo dosah přímého světla. Skladování při teplotě do 25 °C je možné po dobu maximálně 15 dnů..

### Přepravní podmínky

Podmínky skladování by měly být přísně dodržovány.

Výrobky by měly být přepravovány v uzavřených a vyztužených krabicích, aby se zabránilo jejich poškození. Přeprava tohoto výrobku nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví. Výrobek může být během přepravy uchováván při teplotě nižší než 25 °C po dobu až 15 dnů.

### Doba použitelnosti

5 let od data výroby

### Balení

200 kusů v sáčku z hliníkové fólie.

### Značení

Na obalu výrobku: kód a popis výrobku, informace o výrobcu, podmínky skladování, obchodní úprava, podmínky použití, číslo šarže, datum výroby, datum použitelnosti, čárový kód a datový kód..

### Možnosti využití

Zdravotnictví a průmysl.

### Ostatní důležité informace

Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití výrobku.

### Bezpečnostní opatření

Výrobek skladujte v původním obalu, mimo dosah světla, dezinfekčních prostředků, plynů a vlhkosti.

Při nevhodných skladovacích podmínkách mohou být výsledky chybné. Nevlhčete.

Výrobek nepoužívejte opakovaně.

**Objednávky ČR:**

JK – Trading spol. s r.o.  
Křivatcová 421/5  
155 21 Praha 5 – Zličín  
Tel.: +420 257 220 760  
e-mail: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

**Objednávky SK:**

JK – Trading spol. s r.o.  
Dlhá 1264/43  
900 31 Stupava  
Tel.: +421 907 670 888, 264 776 790  
e-mail: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

**Více informací:**

Bc. Kováč 777 929 624  
Ing. Žůrová 777 929 623  
Ing. Kryl 777 929 604  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)

Překlad: 4/2023/JK

# IT27W-10

## Indicador de lavado y termodesinfección

Para control de rutina de procesos de desinfección térmica.



### Uso previsto

Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras. Condiciones de emulación: 10 min., 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) o equivalente.

### Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

### Características

- Tira unilaminada impresa con tinta indicadora, soporte sintético estable a la temperatura.
- Color inicial: Verde.
- Color final: Púrpura.
- Tamaño: 69,5 mm x 30 mm.

- 100 % Libre de Metales Pesados Tóxicos



### Condiciones ambientales de producción

T= 15-30 °C, HR= 30-80 %.

### Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperaturas entre 0 °C y 4 °C, HR= 30-80 %, mantener al abrigo de la luz. El almacenamiento a temperaturas de hasta 25 °C es posible por un periodo limitado no superior a los 15 días.

### Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento. Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas. Para su transporte, el producto puede estar un tiempo máximo de 15 días a temperatura menor a 25 °C.

### Período de vida útil

5 años

### Envase

200 unidades por bolsa de aluminio.

### Etiquetado

En el envase: código y descripción del producto, información del fabricante, condiciones de almacenamiento, condiciones de uso, presentación, lote, fecha de fabricación y de vencimiento, código de barras y código datamatrix.

### Posibles mercados de destino

Salud e industria

### Otra información relevante

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

### Precauciones

Almacenar el producto en su envase original, alejado de la luz, desinfectantes, gases y humedad.

El almacenamiento en condiciones inadecuadas de conservación puede arrojar resultados erróneos.

No mojar.

No reutilice este producto.