

**Název výrobku:** TOSI® FlexiCheck 8298 – testovací proužky  
 TOSI® FlexiCheck 8299 – silikonová hadice s tělískem  
 TOSI® FlexiCheck 82991 – modrá hadice s pouzdem  
 TOSI® FlexiCheck 8296 – adaptér pro Wassenburg  
 TOSI® FlexiCheck 82961 – adaptér pro Olympus

**Zařazení:** test pro kontrolu a validaci mytí a čištění dutých nástrojů s pružnou dutinou

**Typ testu:** kovový proužek s testovací skvrnou k použití s tělískem s hadicí o délce 1 m

**Bližší specifikace:** proužek z nerezového materiálu se dvěma testovacími skvrnami, které mají podobné složení, jako lidská krev a tkáň. Test se vkládá do tělíska, jehož součástí je 1 metr dlouhá hadice

#### Expozice a parametry:

Druh detergentu	Koncentrace (g/l)	Doba mytí (min)	Teplota (°C)
Alkalický (pH 11,5)	<5	5	<60
Neutrální s enzymy	10	10	45
Neutrální bez enzymů	7-10	10	45 - 60

nebo podle doporučení výrobce endoskopů

**Popis výrobku:** nerezový proužek s nanesenou testovací skvrnou k použití do kovového tělíska – pro kontrolu účinnosti mytí flexibilních endoskopů. Hadice se po vložení testovacího proužku napojuje na trysku mycího zařízení prostřednictvím speciálního adaptéru.

**Procesní charakteristika:** účinnost mycího procesu se vyhodnocuje podle odmytí testovací skvrny. Veškeré červené zbarvení i celá žlutá skvrna musí být úplně umyté a nerezový nosič musí zůstat úplně čistý a lesklý

**Fyzikální charakteristika:** kovový proužek, kovové tělísko s hadicí

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při teplotě 2°C - 25°C.

Při skladování chraňte indikátory před světlem a teplem. Nepoužívané testy nevyjímejte z originálního obalu. Uchovávejte mimo dosah dezinfekčních prostředků a chemických výparů.

POZOR! Nevlhčete!


**Poznámka:** Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko obsluhujícímu personálu

**Expirace:** 18 měsíců od data výroby, viz obal

**Klasifikace:** ČSN EN ISO 15883

**Obsah balení:** 25 kusů

**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

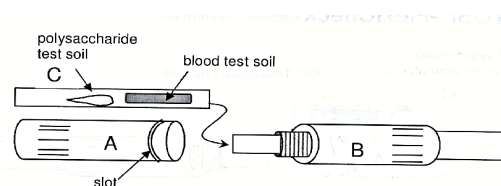

PEREG GmbH  
 Porschestraße 12  
 D-84478 Waldkraiburg  
 +49 8638 84100