



HIV-1/2 Ag/Ab Combo Test

In vitro diagnostikum určeno pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem.



Účel použití :

Imunochromatografické testovací karty ke kvalitativní detekci **antigenu** p24 a **protilátek** proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě a krvi v jednom testu.

Čas odečtu testu 20-30 min.

Diagnostická senzitivita testu v rámci HIV pozitivní populace byla stanovena na 100%.

Další údaje o specifitě, analytické senzitivitě a korelaci výsledků dosažených z různých vzorků jsou součástí návodu.

katalog.č.	Druh výrobku	počet testů v balení	cena/test s 21 % DPH
7D2846	testovací karty	20	97
7D2847	testovací karty	100	79
7D2227	EDTA kapiláry pro odběr kapilární krve	pro 100 testů	363
7D2247	Promývací pufr pro plnou a kapilární krev	pro 100 testů	291

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.



Unipath Ltd, Bedford MK44 3UP, UK

Tel: +44 (0) 1234 835000

Fax: +44 (0) 1234 835009

Determine je obchodní značkou skupiny společností Inverness Medical Group.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5
 tel.: 257 220 760
 email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
 Ing. Ernestová 777 477 308
 Morava - Ing. Žůrová: 777 929 623

Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Sérum/Plazma - provedení testu

Číslo šarže

Název testu

Kontrolní výsledek zde

Zde přidejte vzorek

Zde odečtěte p24 výsledek antigenu

Zde odečtěte výsledek protilátek

- 1 Odtrhněte jeden test**
- 2 Sejměte ochranou pásku**
- 3 Přidejte vzorek**

Přidejte vzorek séra nebo plasmu (50μl) do testovacího proužku.

Vyčkejte 20 minut

4 Vyhodnocení testu

HIV-1/2 Ag/Ab Combo

Kontrola	Pacient	Protilátky	p24	Protilátky
Positivní	Positivní	Positivní	Negativní	Neplatné
Positivní	Positivní	Positivní	Positivní	Positivní
Positivní	Positivní	Positivní	Negativní	Positivní
Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní
Negativní	Negativní	Negativní	Positivní	Negativní

Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Plná krev - provedení testu

Číslo šarže

Název testu

Kontrolní výsledek zde

Zde přidejte vzorek

Zde odečtěte p24 výsledek antigenu

Zde odečtěte výsledek protilátek

- 1 Odtrhněte jeden test**
- 2 Sejměte ochranou pásku**
- 3 Přidejte vzorek**

Přidejte vzorek kapilární nebo venózní krve (50μl) do testovacího proužku.

Vyčkejte 1 minutu

4 Přidejte pufr

Přidejte jednu kapku pufru.

5 Vyhodnocení testu

HIV -1/2 Ag/Ab Combo

Kontrola	Pacient	Protilátky	p24	Protilátky
Positivní	Positivní	Positivní	Negativní	Neplatné
Positivní	Positivní	Positivní	Positivní	Positivní
Positivní	Positivní	Positivní	Negativní	Positivní
Negativní	Negativní	Negativní	Negativní	Negativní
Negativní	Negativní	Negativní	Positivní	Negativní