



Belgický výrobce Global Diagnostic B a český distributor JK-trading nabízí rychlé imunochromatografické testy pro ordinace lékařů



Vitamin D rychlý test

pro kvantitativní stanovení celkového 25-OH Vitaminu D ve vzorku lidské kapilární krve

Použití:

Při poruchách kostního metabolismu nebo přístítných tělísek, při možném deficitu nebo malabsorpci vitaminu D a ke sledování některých pacientů léčených vitaminem D.

Vzorek: Kapilární krev 10 ul.

Kvantitativní výsledek do 15 minut za použití CUBE readeru (viz. obrázek)

Citlivost: 3 ng/ml

Specifita: 100%

Přesnost měření: Srovnávací metoda Siemens ADVIA Centaur Vitamin D- nalezena 95% shoda

Rozsah měření: 3-100 ng/ml

Skladování: +4 až +30⁰C

Studie zkřížené reaktivity a interferencí: Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce s bilirubinem, triglyceridy, cholesterolem, vitaminem C a B12.

25-OH Vitamin D - Referenční hodnoty (ng/ml) dle výrobce

Deficit 0 – 10

Nedostatečnost 10 – 30

Dostačující 30 – 100

Toxicita >100

Konverze jednotek 25OHD: 1 ng/ml=2,5 nmol/l

CUBE Reader 12.900,- Kč bez 21% DPH (15.609,-Kč vč DPH)

Cube reader je nutná součást pro vyhodnocení kazety vitaminu D

Cena/test 275,- Kč bez 21% DPH (333,- Kč vč.DPH)

Balení 25 ks, katalogové číslo GBD 7120-25T

Orientační cena platná od ledna 2018.

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:


Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová 777 477 308
Morava - Ing. Žůrová: 777 929 623



Belgický výrobce Global Diagnostic B a český distributor JK-trading nabízí rychlé imunochromatografické testy pro ordinace lékařů



Zjednodušený postup :

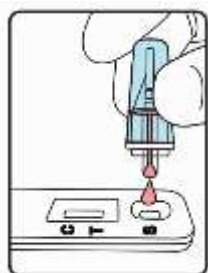

Odebranou krev kápněte do kazetového testu do jamky S určené pro vzorek.



1. Polohu testu zorientujte podle adaptéru, který je určen pro kazetový test a Cube reader.

2. Správně umístěte adaptér na povrch testovací



kazety.

3. Umístěte reader na adaptér a odečtěte výsledek.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová 777 477 308
Morava - Ing. Žůrová: 777 929 623