

Kód výrobku: CI-DHI a CI-DHI/500

Distributor:


 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.  
 ČR: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
 SR: [www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)
**Název výrobku:** Dry Heat Indicator Label**Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** papírový proužek s testovacím polem indikátoru**Typ sterilizace:** proudící horký vzduch/suché teplo**Expozice:** 160°C/10 min (+/-2 min) a vyšší**Použití:**

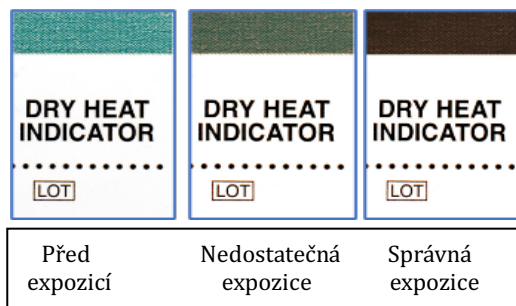
1. Umístěte indikátor do stejného obalu, jako ostatní sterilizovaný materiál a vložte jej do sterilizátoru ke vsázce (počet určuje platná národní legislativa)
2. Spusťte sterilizační cyklus.
3. Po skončení cyklu vyjměte indikátor z obalu a vyhodnoťte vsázku.
4. Výsledky zaznamenejte do dokumentace.

**Vyhodnocení:****Vyhovující cyklus:** pokud se zbarví pole indikátoru ze zelené na jednolitou tmavě hnědou až černou, sterilizace byla úspěšná**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zbarvil nestejně nebo jen částečně, nebo je získaná barva světlá. Tento stav signalizuje nedostatečné sterilizační podmínky.

Pokud je zkouška nevyhovující, test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15°C - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

**Expirace:** 3 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1**Obsah balení:** 1000 ks/500 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK

**Mesa France**  
 2 Rue Auguste Fresnel  
 69680 Chassieu Cedex – France  
 Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
 Email: [mesafrence@mesalabs.com](mailto:mesafrence@mesalabs.com)