

**Název výrobku: Cross-Checks EO****Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** papírový proužek s testovacím polem**Bližší specifikace:** papírový proužek s testovacím polem indikátoru ve tvaru písmene V a sleduje všechny kritické parametry sterilizace**Typ sterilizace:** ethylenoxid**Expozice:** koncentrace EO 600 mg/l, 60 min, teplota 55 %, vlhkost 40-60 %**Použití:**

1. Umístěte indikátor do kontejneru s nástroji, pokud jej používáte jako vsázkový, dejte jej do obalu, ve kterém sterilizujete nástroje, a umístěte do plné sterilizační komory v množství, stanoveném platnou legislativou.
2. Spusťte sterilizační cyklus.
3. Po skončení cyklu vyjměte indikátor z obalu a vyhodnoťte vsáčku.
4. Výsledky zaznamenejte do dokumentace.

**Vyhodnocení:**

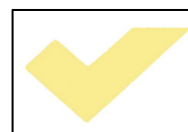
**Vyhovující cyklus:** pokud se zbarví pole indikátoru z jasně žluté na jednolitou hnědou, sterilizace byla úspěšná – viz referenční vzorek na šipce

**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zbarvil nestejně nebo jen částečně, nebo barva neodpovídá vzoru na indikátorovém proužku – viz tabulka. Tento stav signalizuje přítomnost zbytkového vzduchu v komoře sterilizátoru.

Pokud je zkouška nevyhovující, test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15°C - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

**Expirace:** 2 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882**Obsah balení:** 250 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Před expozicí

Správný  
výsledekCHYBA  
Správných  
sterilizačních  
parametrů  
nebylo  
dosaženo

**Mesa France**  
 2 Rue Auguste Fresnel  
 69680 Chassieu Cedex – France  
 Phone: +33 (0)4 78 90 56 88  
 Email: [mesafrence@mesalabs.com](mailto:mesafrence@mesalabs.com)