

Název výrobku: Cross.Checks F**Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** laminovaný proužek s testovacím polem**Bližší specifikace:** papírový proužek s testovacím polem indikátoru ve tvaru písmene V**Typ sterilizace:** formaldehyd**Expozice:** koncentrace formaldehydu 1-2 %
vodní pára při teplotě do 80 °C
podtlak až 90 kPa
délka cyklu 60-90 min**Použití:**

1. Umístěte indikátor do stejného obalu, jako ostatní sterilizovaný materiál a vložte jej do sterilizátoru ke vsázce (počet určuje platná národní legislativa)
2. Spusťte sterilizační cyklus.
3. Po skončení cyklu vyjměte indikátor z obalu a vyhodnoťte vsázku.
4. Výsledky zaznamenejte do dokumentace.

Vyhodnocení:**Vyhovující cyklus:** pokud se zbarví pole indikátoru z purpurové na jednolitou zelenou barvu šipky, sterilizace byla úspěšná**Nevyhovující cyklus:** obrazec indikátoru se zbarvil nestejně nebo jen částečně, nebo barva neodpovídá vzoru (barvě šipky). Tento stav signalizuje nedostatečné sterilizační podmínky.

Pokud je zkouška nevyhovující, test opakujte. V případě druhého nevyhovujícího výsledku přivolejte servisního technika.

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 70 % a při pokojové teplotě 15°C - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Expirace: 2 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882**Obsah balení:** 250 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JKPřed
expozicíSprávný
výsledekChybný
výsledek**Mesa France**
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com