



Helikobakter pylori (HP)

Test na detekci antigenu HP ve vzorku lidské stolice.

obj. číslo 009AF401

HP způsobuje několik druhů gastroenterologických onemocnění, jako je non-ulcerózní dyspepsie, žaludeční a duodenální vřed, aktivní zánět žaludku a může dokonce zvyšovat riziko vzniku žaludečního adenokarcinomu, takže byl klasifikován jako karcinogen typu I.


ulti med antigen H. pylori test je rychlý vizuální test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori v lidské stolici.

Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení diagnózy infekce H. pylori. Pouze pro profesionální použití.

Relativní senzitivita: >99,9% (97,3%~100,0%), Relativní specifická: >99,9% (97,6%~100,0%),

Celková shoda : >99,9% (98,7%~100,0%), 95% Interval spolehlivosti. Výsledek do 10 minut.

Postup při odběru vzorku.

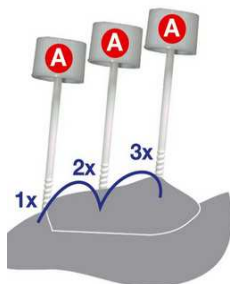

správně

příliš mnoho

Skladování vzorku : Vzorky je možné skladovat při teplotě 2-8 °C po dobu až 72 hodin. Nejlepších výsledků se dosáhne, jestliže se test provede do 6 hodin po odběru.

Skladování soupravy : při pokojové teplotě nebo v chladničce (mezi 2-30°C)

Doba expirace testu : až 15 měsíců.

Balení : po 20 testech včetně odběrového setu na stolici.

Cena za balení včetně 21% DPH: 1.709,- Kč.

Orientační cena platná od ledna 2018.

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.



Německý výrobce ulti med a český distributor JK-trading nabízí rychlé imunochromatografické testy pro ordinace lékařů



Helikobakter pylori (HP) Test na detekci protilátky HP ve vzorku plné krve, séra nebo plazmy

obj. číslo 012L400

Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení diagnózy infekce H. Pylori. Pouze pro profesionální použití.

Relativní Sensitivita: >96,8% (95CI* 92,6% - 98,9 %)

Relativní Specificita: >93,0% (95CI* 88,8 % - 96,0%)

Celková shoda : >94,6% (95CI* 91,8% - 96,7%)

*CI – Confidence interval = Interval spolehlivosti

Výsledek do 10 minut.

Skladování vzorku : Plná krev odebraná z prstu je určena k okamžitému testování.

Plnou krev odebranou ze žíly je možné skladovat po dobu 2 dnů při teplotě 2 - 8° C.

Sérum a plazmu je možné skladovat při teplotě 2-8 ° C po dobu až 3 dnů. Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky.

Skladování soupravy : při pokojové teplotě nebo v chladničce (mezi 2-30°C)

Doba expirace testu : až 15 měsíců.

Balení : po 20 testech

Cena za balení včetně 21% DPH: 1.289,- Kč

Orientační cena platná od ledna 2018.

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová 777 477 308
Morava - Ing. Žurová: 777 929 623